


ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ ОДНОРАЗОВЫЕ

(Размеры №№ : 10;11;12;12B;13;14;15;15C;16;18;19;20;21;22;23;24;25;36)

- Предназначены для всех видов хирургических вмешательств;
- Изготовлены из нержавеющей стали;
- Стерилизованы радиационным методом;
- Размеры №10-№36;
- Лезвия индивидуально упакованы в фольгу, ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару.

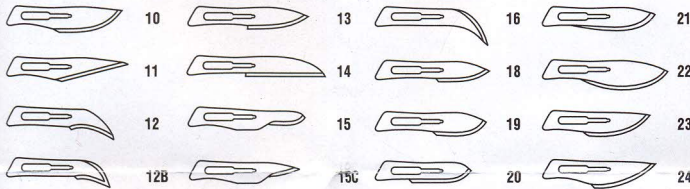

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Срок стерильности 3 года с даты стерилизации, указанной на упаковке;
- Только для однократного применения;
- Не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки;
- Соблюдать меры предосторожности при работе с изделием повышенной опасности (возможность травматизма)!
- Хранить при температуре от -30 до $+45^{\circ}\text{C}$;
- Утилизация и обработка лезвий для скальпеля согласно ГОСТа 42-21-2-81.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Вскрыть коробку и достать индивидуальную упаковку лезвия;
- Вскрыть индивидуальную упаковку и извлечь лезвие соблюдая правила асептики;
- Присоединить стерильное лезвие к стерильной ручке многоразового использования через специальные отверстия-крепления на лезвии;
- По окончании работы скальпелем снять лезвие с ручки в обратном порядке, соблюдая меры предосторожности;
- После использования лезвия подлежат утилизации в установленном порядке.